




STEP 1. Apri la fibra.

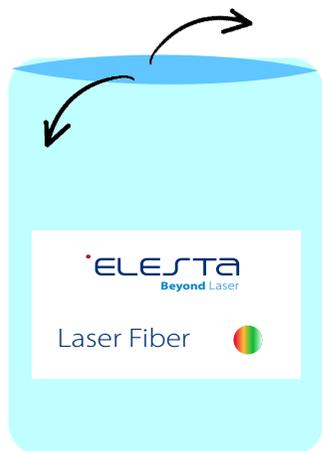


STEP 2. Connetti la fibra al laser.

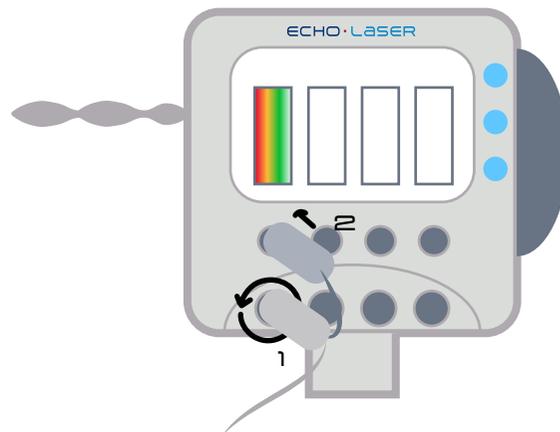


STEP 3. Appendi il supporto in cartone al laser. Evita movimenti che potrebbero compromettere la sterilità della punta della fibra.

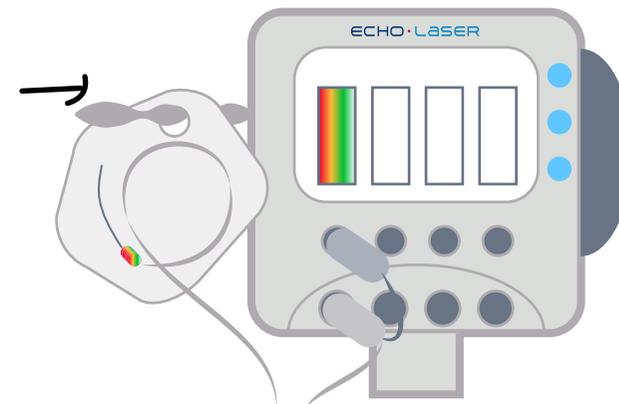

STEP 4. Attiva la fibra e controlla il fascio luminoso.

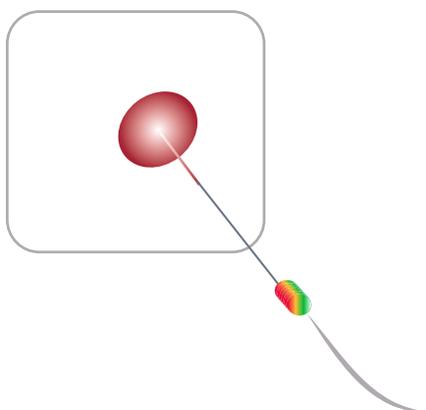

STEP 5. Se necessario, procedere col test fibra utilizzando il supporto in cartone come vassoio.

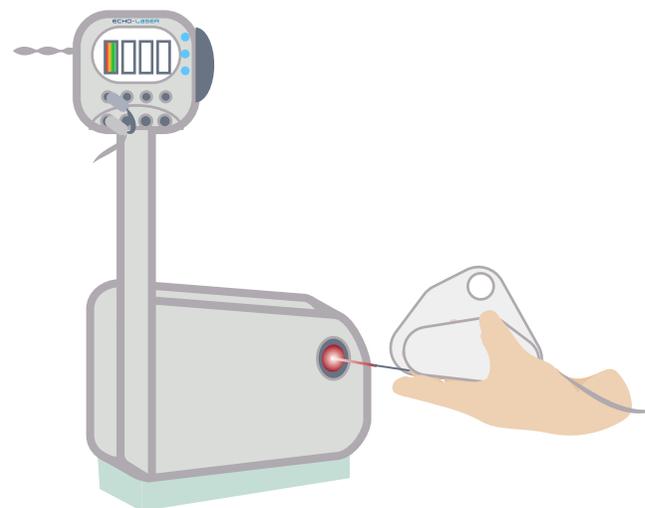

Attenzione : Il colore della fibra nella seguente etichetta ha solo scopo illustrativo. IL colore effettivo della fibra all'interno del box potrebbe variare.